

車いす用段差解消機

# テクノリフターTDK100SS

## キャスター仕様登場



使用時は底部と床面が  
しっかり接地しています



使わない時は  
キャスターを  
展開して  
収納場所まで  
移動可能です

### キャスター仕様にはこんなメリットがあります！

- 建築設備に含まれない為特別な申請が必要ありません
- 使用時以外は設置場所を占有しません
- 特別な床工事やアンカー固定等が必要ありません

※キャスターの格納方法、移動方法は裏面参照

# キャスター仕様 使用方法



**参考写真1**

手順①にある操作を行うと写真のようにリフト底部が接地しキャスター部分が浮く。



## 手順①

昇降機を使用予定位置まで転がしてきたら、操作スイッチの⑤ボタンを押してキャスターを浮かせる。



## 手順②

キャスターの固定ピンを外して本体から抜き取る。



## 手順③

タイヤを上向きの状態にしたら再度キャスターを本体に差し込む。



## 手順④

写真のような状態でキャスターを固定出来ていれば安全に使用可能となります。



**参考写真2**

使用する際はこのようにキャスターが上を向いている状態が正しい状態です。



**新光産業株式会社**

大阪本社 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目2-12  
東京支店 〒103-0002 中央区日本橋馬喰町1-6-6吉野第二ビル4F  
中部事業所 〒465-0092 名古屋市中東区社台3丁目230ランドビル307号室